

Focus 40

Guia do Usuário



A embalagem do Focus 40 contém o seguinte:

1. **Linhas Braille Focus 40 Blue:** O componente principal, que oferece uma linhas braille de 40 células e se conecta a dispositivos móveis via Bluetooth ou computador/Notebook.
2. **Cabo USB:** Para carregar a Focus 40 Blue e para conectividade com dispositivos que não possuem Bluetooth.
3. **Fonte de Alimentação:** Para carregar a Focus 40 Blue através do cabo USB.
4. **Bolsa de transporte:** Para transportar a Focus 40 Blue.

Desempacotando e Inicializando:

1. **Carregamento Inicial:** Utilize o cabo USB e a fonte de alimentação para carregar a Focus 40 Blue. Aguarde até que a carga esteja completa.
2. **Conectividade Bluetooth (Opcional):** Se desejar conectar a Focus 40 Blue a dispositivos móveis via Bluetooth, ative o Bluetooth na Focus 40 Blue e no dispositivo móvel. Siga as instruções do manual para emparelhamento.
3. **Conectividade com Cabo USB:** Para conexão com dispositivos sem Bluetooth, conecte a Focus 40 Blue usando o cabo USB.
4. **Configurações Iniciais:** Ao ligar a Focus 40 Blue, siga as instruções do manual para configurar preferências básicas, como idioma e configurações de braille.
5. **Explorando a Linha Braille:** Utilize os controles para navegar e ler o conteúdo exibido na Focus 40 Blue. Experimente os diferentes modos de leitura disponíveis.

6. **Explorando a Conectividade Bluetooth (Opcional):** Se conectado a um dispositivo móvel, experimente a leitura de mensagens, emails e outros conteúdos braille diretamente na Focus 40 Blue.


Garantia do produto

"Nossa garantia cobre defeitos de fabricação em materiais e mão de obra que possam ocorrer durante o uso normal do produto. Defeitos resultantes de manutenção inadequada, reparos não autorizados ou falha em seguir as instruções operacionais são apenas alguns dos itens não cobertos. Danos causados pelo uso de acessórios e peças, incluindo carregadores, que não foram autorizados anulam a garantia.

Para receber serviços, entre em contato com a Tecassistiva".

Guia do usuário e documentos

Para baixar o manual completo do produto e documentos acesse o site da Tecassistiva na aba suporte no link: www.tecassistiva.com.br/suporte/ ou pelo QR CODE:

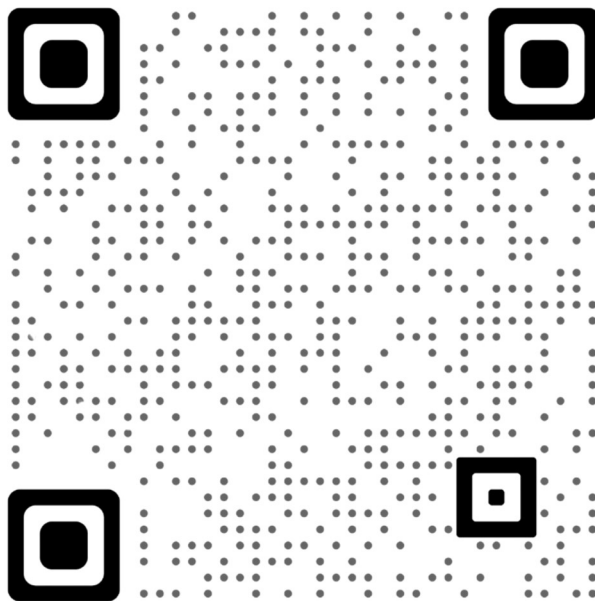

Suporte ou dúvidas:

Site: www.tecassistiva.com.br

Email: suporte@tecassistiva.com.br

Telefone: (11)3266-4311 opção 2

Endereço: Rua das Camélias, 37 - Mirandópolis, São Paulo - SP, 04048-060

Para obter suporte técnico, entre em contato com a Tecassistiva.

Obrigado por comprar seu produto com a Tecassistiva!