

Topaz XL HD

Guia de Combinação de Teclas



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

PUBLICADO POR

Freedom Scientific

11800 31st Court North
St. Petersburg, Florida 33716-1805
EUA

www.FreedomScientific.com

E POR

Tecassistiva

Av. Dr. Altino Arantes, 345 - Vila Clementino
04042-032, São Paulo- SP
Brasil

Telefone/Fax: (11) 3266-4311

E-mail: teca@tecassistiva.com.br


www.tecassistiva.com.br

O conteúdo deste documento pode ser alterado sem qualquer aviso prévio. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida de nenhuma forma ou por nenhum meio eletrônico ou mecânico, por nenhum motivo, sem expressa permissão escrita da Freedom Scientific e da Tecassistiva.

Copyright © 1993 - 2010 Freedom Scientific. Todos os direitos Reservados.

TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

TOPAZ[®] Cartão de Referência do Painel de Controle XL HD

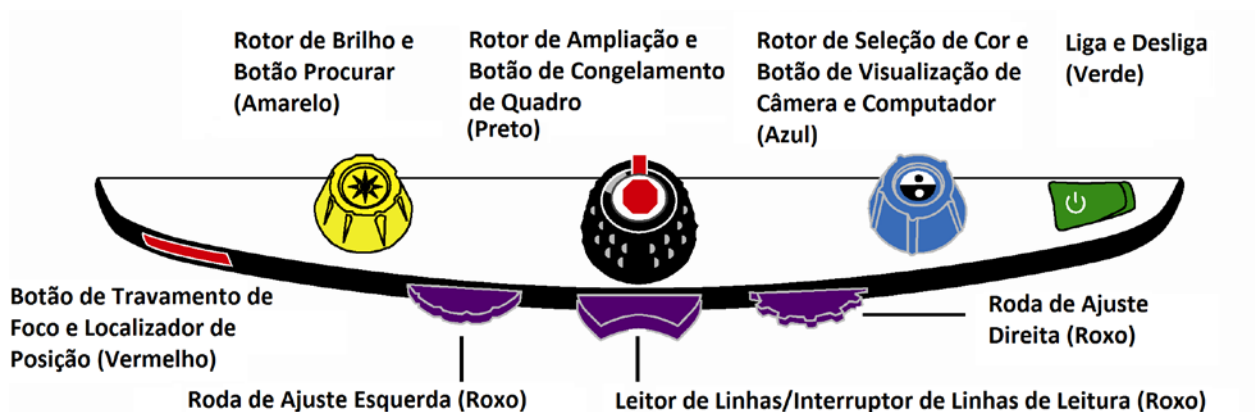

| Rotor / botão / alternador | Funcionalidade |
|--|--|
| Rotor de Brilho / Botão localizar (Amarelo) | Gire para alimentar ou diminuir o brilho da tela. Pressione e segure o centro para fazer um zoom usando o recurso localizar. Solte para retornar o zoom ao normal. |
| Rotor de Ampliação / Botão Congelar Quadros (Preto) | Gire para alimentar ou diminuir a ampliação. Pressione o centro para alternar entre congelar quadros ativado/desativado. |
| Botão Rotor de Seleção de Cores / Visualização de Câmera e Computador (Azul) | Gire para escolher um modo de cores que se ajuste melhor ao que sua visão necessita. Pressione o centro para alternar entre a câmera do TOPAZ XL HD e um computador conectado. Pressione o centro para alternar entre linha de leitura horizontal ativado/desativado se não estiver conectado a um computador. |
| Alternador de Modo de Suspensão de Energia (Verde) | Pressione a direita para colocar o TOPAZ XL HD no modo de suspensão. Pressione a esquerda para ligar o TOPAZ XL HD a partir do modo de suspensão. |

| Rotor / botão / alternador | Funcionalidade |
|---|---|
| Botão Bloquear Foco / Botão Localizador de Posição (Vermelho) | <p>Pressione para ativar bloquear foco. Pressione uma segunda vez para ativar o localizador de posição. Pressione-o uma terceira vez para desativar ambos o localizador de posição e o modo Trava de Foco.</p> <p>Pressione e segure simultaneamente com o centro do rotor amarelo de brilho para ligar/desligar as luzes de leitura.</p> |
| Interruptor de Linhas de Leitura e Máscaras de Leitura (Roxo) | <p>O interruptor está localizado debaixo da capa plástica (não aparente) abaixo do painel de controle.</p> <p>Pressione a direita para circular entre linhas horizontais, linhas verticais, máscaras verticais, máscaras horizontais e nenhuma.</p> <p>Pressione a esquerda para circular entre máscaras horizontais, máscaras verticais, linhas verticais, linhas horizontais, e nenhum.</p> |
| Roda de ajuste esquerda (Roxa) | <p>A roda está localizada debaixo da capa plástica (não aparente) abaixo do painel de controle.</p> <p>Vire a esquerda ou direita para mover tanto as linhas de leitura ou as máscaras de leitura para cima ou para baixo ou esquerda e direita na tela.</p> |
| Roda de ajuste direita (Roxa) | <p>A roda está localizada debaixo da capa plástica (não aparente) abaixo do painel de controle.</p> <p>Para linhas ou máscaras horizontais, gire a roda para mover a linha ou máscara superior para cima ou para baixo. Isto aumenta ou diminui a distância entre as linhas ou máscaras horizontais.</p> <p>Para linhas ou máscaras verticais, gire a roda para mover a linha ou máscara direita para esquerda ou direita. Isto aumenta ou diminui a distância entre as linhas ou máscaras verticais.</p> |