

BIGTrack

Guia do Usuário



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

FABRICANTE:

AbleNet, Inc.

2625 Patton estrada Roseville, MN 55113 EUA

Tel: (800) 322-0956 / (651) 294-2200

Site: www.ablenetinc.com

PUBLICADO POR

Tecassistiva


Av. Dr. Altino Arantes, 345 - Vila Clementino
04042-032, São Paulo- SP Brasil

Telefone/Fax: (11) 3266-4311

E-mail: teca@tecassistiva.com.br

Site: www.tecassistiva.com.br

O conteúdo deste documento pode ser alterado sem qualquer aviso prévio. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida de nenhuma forma ou por nenhum meio eletrônico ou mecânico, por nenhum motivo, sem expressa permissão escrita da AbleNet e Tecassistiva.

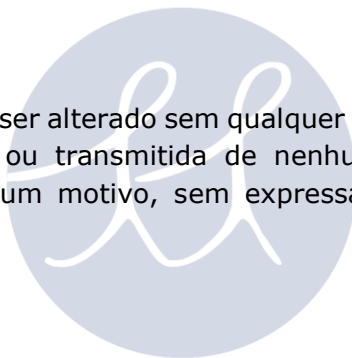

TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

Índice

Bloqueio ao Arrastar.....	4
Conexão USB.....	4
Conexão PS/2.....	4
Garantia.....	4
Uso do Acionador.....	5
Importador Exclusivo.....	6



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

Bloqueio ao Arrastar.

Com o BIGTrack™ é possível arrastar um objeto pela tela sem a necessidade de manter o botão esquerdo do mouse pressionado.

Para habilitar o bloqueio ao arrastar:

1. Passe o cursor sob o objeto que deseja arrastar.
2. Dê um duplo clique com o botão direito do mouse para travar o objeto.
3. Arraste o objeto pela tela até o local desejado.
4. Para completar a movimentação do objeto dê um clique único no botão direito ou esquerdo do Mouse.

Conexão USB

Basta conectar o cabo USB do Bigtrack™ a porta USB de seu computador ou a um HUB USB.

Não é necessário nenhum tipo de reinicialização ou desligamento

Conexão PS/2:

5. Desligue o seu computador.
6. Conecte o adaptador USB/PS/2 ao cabo de seu BigTrack®.
7. Conecte a saída do adaptador a entrada OS/2 de seis pinos.
8. Ligue o seu computador.

Garantia

Os produtos fabricados pela AbleNet incluem uma garantia limitada definida pelo Distribuidor local. Esta garantia vale para defeitos de materiais e de fabricação pelo período a contar da data da compra.

Informações mais detalhadas sobre a garantia bem como sobre a forma de envio do equipamento a empresa e seu reparo estão disponíveis em www.tecassistiva.com.br.

Para obter mais informações sobre os produtos e serviços da AbleNet, entre em contato:

Tecassistiva - Tecnologia e Acessibilidade

Av. Dr. Altino Arantes, 345 - VL. Clementino

São Paulo - SP - CEP 04.042-032

Telefone: +55 (11) 3266-4311

Site: www.tecassistiva.com.br

Uso do Acionador:

O BigTrack® possui duas portas para acionadores, localizadas nas laterais direita e esquerda do equipamento.

Para usar um acionador, apenas conecte-o a uma destas portas. Cada acionador fará a mesma função, simulando cliques dos botões direito ou esquerdo como se fosse no próprio dispositivo.



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

Importador Exclusivo

Tecassistiva

Av. Dr. Altino Arantes, 345 - Vila Clementino
04042-032, São Paulo- SP Brasil

Telefone/Fax: (11) 3266-4311

E-mail: teca@tecassistiva.com.br

Site: www.tecassistiva.com.br

FABRICANTE:

AbleNet, Inc.

2625 Patton estrada Roseville, MN 55113 EUA

Tel: (800) 322-0956 / (651) 294-2200

Site: www.ablenetinc.com



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade