

Eye-Pal SOLO

Guia de Instalação



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

PUBLICADO POR

AbiSee

20 Main St, Suite G2
Acton, MA 01720

Telefone: + 1-800-681-5909 ou +1-978-635-0202

www.abisee.com

E POR

Tecassistiva

Av. Dr. Altino Arantes, 345 - Vila Clementino
04042-032, São Paulo- SP
Brasil

Telefone/Fax: (11) 3266-4311

E-mail: teca@tecassistiva.com.br

www.tecassistiva.com.br



O conteúdo deste documento pode ser alterado sem qualquer aviso prévio. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida de nenhuma forma ou por nenhum meio eletrônico ou mecânico, por nenhum motivo, sem expressa permissão escrita da AbiSee e da Tecassistiva.

TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

Inicialização Rápida para Eye-Pal SOLO

- **Passo 1:** Ative o Eye-Pal SOLO segurando o botão quadrado verde localizado no lado direito do painel frontal.
- **Passo 2:** Gire o botão preto de volume, no meio do painel frontal, no sentido horário. Um tom será reproduzido enquanto o software é carregado.

Nota: Você pode utilizar fones de ouvido com um plugue de áudio. Fones de ouvido com conectores USB não são compatíveis com Eye-Pal SOLO.

- **Passo 3:** Uma vez que o Eye-Pal SOLO terminou de carregar, você ouvirá "Por favor coloque seu documento." Você está agora pronto para ler.

Nota: Mantenha a plataforma livre de qualquer documento até que você ouça "Por favor coloque seu e-mail."

- **Passo 4:** Para iniciar a leitura, coloque o documento na base do Eye-Pal SOLO. Coloque em qualquer direção, como se a orientação não importasse. Você ouvirá um som "de câmera". Eye-Pal SOLO começará a ler seu texto em alguns segundos. Caso você remover o documento, você ouvirá, "Por favor coloque seu documento". Você pode desejar substituir o documento ou retomar a leitura, pressionando o botão Pausar/Retomar no painel frontal da base.

Nota: Eye-Pal SOLO pode ler somente texto de leitura junto das bordas da plataforma de base. Qualquer texto fora das bordas não será lido. Tenha certeza de não obstrua a visão da câmera com suas mãos.

Utilizando o Painel dos Botões Frontais



Pausar/Voltar a Leitura: O botão branco, marcado com duas linhas verticais, para a esquerda do botão preto de volume no painel frontal, permite pausar e volta à leitura.

Sentença de Leitura Anterior: o botão triangular branco, marcado com uma seta apontada para a esquerda. Este botão está no canto direito do painel frontal é utilizado para voltar à sentença anterior. Este botão pode ser pressionado quantas vezes forem necessárias para acionar o retorno a uma sentença específica.

Velocidade de Leitura: existem dois botões triangulares brancos, um acima do outro, localizados a direita do botão de volume no painel frontal. O botão superior aumentará a velocidade de leitura enquanto o botão inferior diminuirá a velocidade de leitura.

Reiniciando: para reiniciar o Eye-Pal SOLO por qualquer motivo, pressione o botão triangular branco por 5 segundos. Você ouvirá "Reiniciando".

Utilizando Gestos com a Mão

Para habilitar os controles ativados por movimento, pressione e segure o botão do painel frontal por 3 segundos. Você ouvirá "Comandos de Gestos Ativados". Por favor, note que os movimentos de mão a seguir funcionam somente quando o documento na plataforma.

- **Pausar/Parar Leitura:** mova sua mão devagar acima do material impresso da esquerda para a direita.
- **Ler Sentença Anterior:** mova sua mão devagar da direita para esquerda acima do material impresso. Mova sua mão quantas vezes necessárias para retornar a sentença específica.

Recursos Específicos com o Teclado

- Leitura de Colunas
- Descrevendo Layout de Páginas
- Alterando Idiomas
- Desligando a Luz



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

Importador Exclusivo

Tecassistiva

Av. Dr. Altino Arantes, 345 - Vila Clementino
04042-032, São Paulo - SP
Brasil

Telefone/Fax: (11) 3266-4311

E-mail: teca@tecassistiva.com.br

www.tecassistiva.com.br

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 8:00 às 18:00 Horário de Brasília (BR)

Horário de Suporte Técnico: Segunda a Sexta, das 8:00 às 18:00 Horário de Brasília (BR)


FABRICANTE

AbiSee

20 Main St, Suite G2
Acton, MA 01720

Telefone: + 1-800-681-5909 ou +1-978-635-0202

www.abisee.com

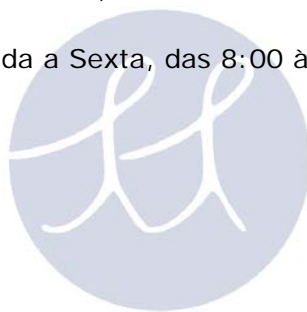

TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade