

Eye-Pal SOLO

Guia do Usuário



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

PUBLICADO POR

AbiSee

20 Main St, Suite G2
Acton, MA 01720

Telefone: + 1-800-681-5909 ou +1-978-635-0202

www.abisee.com

E POR

Tecassistiva

Av. Dr. Altino Arantes, 345 - Vila Clementino
04042-032, São Paulo- SP
Brasil

Telefone/Fax: (11) 3266-4311

E-mail: teca@tecassistiva.com.br

www.tecassistiva.com.br



O conteúdo deste documento pode ser alterado sem qualquer aviso prévio. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida de nenhuma forma ou por nenhum meio eletrônico ou mecânico, por nenhum motivo, sem expressa permissão escrita da AbiSee e da Tecassistiva.

TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

Índice

Componentes Dentro Desta Caixa.....	4
Montagem	4
O que o Eye-Pal SOLO Pode Fazer	4
Inicialização Rápida para Eye-Pal SOLO	5
Como Ler com Eye-Pal SOLO	5
Instruções de Operação.....	5
Método de Controle dos Painéis Frontais.....	5
Método de Controles Ativados Por Movimento	6
Método de Controle de Teclas	6
Recursos Avançados	7
Modo Livro.....	7
Como iniciar a digitalização no Modo Livro:	7
Como converter um livro salvo em texto:	8
Instruções de Fones de Ouvido (ou alto-falantes)	8
Dicas para Melhor Desempenho.....	8
Solução de Problemas	8
Notas Importantes.....	9
Importador Exclusivo	10



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

Componentes Dentro Desta Caixa

- Base, uma caixa retangular preta de 9.63"/11.5"/2.38".
- Câmera, dispositivo quadrado encaixado no topo do pescoço, um tubo de metal de 16" de comprimento.
- Fonte
- Cabo de Alimentação
- Guia de Referência Rápida
- Cartão de Garantia
- Manual
- Teclado (opcional)

Montagem

Passo 1: Coloque a base do Eye-Pal SOLO em uma superfície plana com o painel frontal e os botões voltados para você.

Passo 2: Pressione com firmeza o botão do pescoço em um buraco no topo da superfície da base para que a câmera estenda diretamente para o meio da base. Ela somente encaixa de uma maneira. Quando inserido apropriadamente, o pescoço não poderá virar.

Passo 3: Na extremidade do pescoço, existe um cabo USB pequeno. Conecte este cabo em uma porta USB localizada na traseira da base.

Passo 4: Conecte a fonte e o cabo de alimentação. Conecte na traseira da base no lado esquerdo. Então conecte o outro em uma tomada.

Seu Eye-Pal SOLO está agora pronto para ser utilizado.

Nota: Existe uma porta de fone de ouvido no lado direito do painel do Eye-Pal SOLO para um som privado. O fone de ouvido NÃO está incluso.

O que o Eye-Pal SOLO Pode Fazer

O Eye-Pal SOLO é versátil, fácil de utilizar, um digitalizador/leitor projetado para fazer com que a leitura seja simples. Por favor, leia este manual por completo e guarde para utilizar com as várias opções do Eye-Pal SOLO.

- Modos de operação:
 - Modo de Leitura;
 - Modo Livro.
- Três passos fáceis de utilizar:
 - Apertando os botões do painel frontal;
 - Com o movimento da mão ativando os controles;
 - Utilizando o teclado (opcional).
- No Modo Leitura, Eye-Pal SOLO habilitará:

- Leitura de revistas, jornais, livros e correspondências;
- Com o teclado, você pode salvar mais de quatro páginas de texto;
- Alternar de voz masculina par feminina;
- Ler textos em Inglês e Espanhol (mais idiomas em breve).

Inicialização Rápida para Eye-Pal SOLO

Passo 1: Ative o Eye-Pal SOLO segurando o botão quadrado verde localizado no lado direito do painel frontal.

Passo 2: Gire o botão preto de volume, no meio do painel frontal, no sentido horário. Um tom será reproduzido enquanto o software é carregado.

Passo 3: Uma vez que o Eye-Pal SOLO terminou de carregar, você ouvirá "Por favor, coloque seu documento." Você está agora pronto para ler.

Nota: Mantenha a plataforma livre de qualquer documento até que você ouça "Por favor, coloque seu e-mail."

Como Ler com Eye-Pal SOLO

Para iniciar a leitura, coloque o documento na base do Eye-Pal SOLO. Coloque em qualquer direção, como se a orientação não importasse. Você ouvirá um som "de câmera". Eye-Pal SOLO começará a ler seu texto em alguns segundos. (Com ou sem o teclado)

Caso você remover o documento, você ouvirá, "Por favor coloque seu documento". Você pode querer substituir o documento ou voltar a leitura, pressionando o botão redondo amarelo de Reprodução/Voltar no painel frontal desta base ou botão Pausar/Voltar no teclado.

Nota: Eye-Pal SOLO pode ler somente texto de leitura junto das bordas da plataforma de base. Qualquer texto fora das bordas não serão lidos. Tenha certeza de não obstrua a visão da câmera com suas mãos.

Instruções de Operação

As seguintes instruções fornecem descrições detalhadas em como utilizar o Eye-Pal SOLO para cada um dos 3 métodos de operação:

1. Controles de Painel Frontal
2. Controles Ativados por Movimento, sem botões!
3. Controles de Tecla

Método de Controle dos Painéis Frontais



Energia: o botão verde quadrado, no canto direito do painel frontal, é utilizado para ligar e desligar o Eye-Pal SOLO.

Volume: o botão redondo escuro no meio do painel frontal é utilizado para ajustar o volume. Para aumentar o volume, gire este botão sentido horário.

Pausar/Voltar a Leitura: o botão branco, marcado com duas linhas verticais, para a esquerda do botão preto de volume no painel frontal, permite pausar e volta a leitura. Caso este botão for pressionado por 3 segundos, este habilitará/desabilitará a utilização dos controles de movimentos ativos.

Sentença de Leitura Anterior: o botão triangular branco, marcado com uma seta apontada para a esquerda. Este botão está no canto direito do painel frontal é utilizado para voltar a sentença anterior. Este botão pode ser pressionado quantas vezes for necessário para adicionar o retorno a uma sentença específica.

Velocidade de Leitura: existem dois botões triangulares brancos, um acima do outro, localizados a direita do botão de volume no painel frontal. O botão superior aumentará a velocidade de leitura enquanto o botão inferior diminuirá a velocidade de leitura.

Reiniciando: para reiniciar o Eye-Pal SOLO por qualquer motivo, pressione o botão triangular branco por 5 segundos. Você ouvirá "Reiniciando".

Método de Controles Ativados Por Movimento

(Desabilitado nas configurações padrões)

Para habilitar os controles ativados por movimento, pressione e segure o botão do painel frontal por 3 segundos. Você ouvirá "Comandos de Gestos Ativados".

Pausar/Parar Leitura: Mova sua mão devagar acima do material impresso da esquerda para a direita.

Retornar Leitura: Mova sua mão devagar acima do material impresso da esquerda para a direita.

Ler Sentença Anterior: Mova sua mão devagar da direita para esquerda acima do material impresso. Mova sua mão quantas vezes necessário para alcançar qualquer sentença.

Método de Controle de Teclas



Botões de Ajuda: localizado no meio do teclado, acima da Seta para Cima, é um botão redondo branco. Este falará a função de cada botão do teclado. Pressione o botão de Ajuda e qualquer outro botão no teclado ao mesmo tempo. Você ouvirá uma descrição do botão e de sua função.

Botão Pausar/Retomar: localizado no centro da das janelas de seta, é um botão quadrado branco, marcado com um círculo preto em relevo. No Modo Leitura, este botão pausará e retomará a leitura.

Seta para Esquerda: localizado a esquerda do botão central redondo Pausa/Retomar, é um botão quadrado branco, com uma seta a esquerda em relevo. No Modo Leitura, pressione este botão para ouvir a palavra anterior.

Seta para Direita: localizado a direita do botão central redondo Pausa/Retomar, é um botão quadrado branco, com uma seta a direita em relevo. No Modo Leitura, pressione este botão para ouvir a próxima palavra.

Seta para Cima: localizado a direita do botão central redondo Pausa/Retomar, é um botão quadrado branco, com uma seta para cima em relevo. No Modo Leitura, pressione este botão para ouvir a sentença anterior.

Seta para Baixo: localizado a direita do botão central redondo Pausa/Retomar, é um botão quadrado branco, com uma seta para baixo em relevo. No Modo Leitura, pressione este botão para ouvir a próxima sentença.

Botão Salvar: localizado no lado superior esquerdo do teclado, é quadrado e branco, com uma linha vertical preta em relevo. Segure o botão Salvar e um dos botões de Seta ao mesmo tempo. Você ouvirá "Imagem salva". Mais de quatro páginas podem ser salvas; uma das páginas designada para cada Botão de Seta.

Botão Chamar: localizado no lado superior direito do teclado, é quadrado e branco, com uma linha horizontal preta em relevo. Segure o botão chamada e Pressione um dos botões de Seta para ler a página anterior. Você ouvirá, "Imagem de leitura".

Recursos Avançados

Leitura de Colunas: quando a seta para Esquerda e seta para Direita são pressionadas ao mesmo tempo, Eye-Pal SOLO irá ler pelas colunas.

Descrevendo o Layout da Página: quando as setas para Cima e para Baixo no teclado pressionadas ao mesmo tempo, Eye-Pal SOLO descreverá o layout da página.

Alteração de idiomas: quando os botões de chamada e Salvar no teclado são pressionados ao mesmo tempo, o Eye-Pal SOLO irão alternar os idiomas e/ou vozes. Textos em espanhol podem ser lidos caso a voz espanhola for selecionada.

Desligando a Luz: Quando os botões Seta para Cima, Seta para Baixo e Pausa no teclado são pressionados ao mesmo tempo, a luz desligará.

Modo Livro

Como Utilizar o Modo Livro com Eye-Pal SOLO: Modo de Livro permite que você salve documentos em um driver USB.

Como iniciar a digitalização no Modo Livro:

1. Ative o Eye-Pal SOLO.
2. Espere que a música pare de tocar, e então ligue o driver USB à porta USB. Você ouvirá "Dispositivo de memória externo detectado. Entrando no Modo de Digitalização".
3. Coloque o documento na plataforma.

4. Espere para o som da câmera.
5. Digitalize seus documentos.

Como converter um livro salvo em texto:

1. Quando você terminar de digitalizar, pressione o botão Pausar/Retomar e escute as páginas que são convertidas em um arquivo de texto.
2. Quando o processo estiver completo, você ouvirá "Conversão completa, você pode agora desconectar o dispositivo de memória externo."
3. Retire seu driver quando informado.

Agora você pode utilizar o driver em seu computador para ver e ler o texto salvo.

Instruções de Fones de Ouvido (ou alto-falantes)

Fones de ouvido com plugue de áudio são recomendados. Fones de ouvido com conectores USB não são compatíveis com Eye-Pal SOLO.

Com o dispositivo ligado, conecte o fone de ouvido ou alto-falantes no Eye-Pal SOLO. O plugue do fone de ouvido está localizado no canto esquerdo do dispositivo.

Nota: Sempre pare a leitura antes de conectar ou desconectar os fones de ouvido ou alto-falantes. Caso você adicionar o remover os fones de ouvido o alto-falantes enquanto o Eye-Pal SOLO estiver lendo um problema ocorrerá, reinicie o dispositivo e siga as instruções.

Dicas para Melhor Desempenho

- Dê um tempo para seu Eye-Pal SOLO trabalhar sozinho. Muitos comandos ao mesmo tempo ou muito rápido você estará confundindo o aparelho. Para melhorar a performance, Eye-Pal SOLO deve processar somente um comando por vez.
- Quando Eye-Pal SOLO está iniciando, tenha certeza de que nenhum documento esteja na base e que o logo ABiSee não está coberto.
- Quando estiver colocando o documento na base SOLO, mantenha o texto plano e tenha certeza que não exista nada obstruindo a visão da câmera do texto (incluindo suas mãos).
- Tenha certeza de que o documento esteja completamente fora do Eye-Pal SOLO antes de colocar qualquer outro documento no local.

Solução de Problemas

O Eye-Pal SOLO é livre de problemas na maioria do tempo pois é muito simples, e ainda por seu design efetivo. Entretanto, caso você encontrar um problema, aqui vão algumas dicas:

1. Caso o Eye-Pal SOLO congele, pare de responder aos seus comandos ou esta agindo fora da normalidade, por favor segure o botão triangular vermelho no painel frontal por alguns segundos. Você ouvirá "Reiniciando". Este processo não faz com que o dispositivo reinicie, somente o software.
2. Caso não resolva o problema, desative o dispositivo, e então ligue-o novamente pressionando o botão redondo verde no painel frontal.

3. Caso os problemas persistirem, por favor ligue para seu distribuidor local ou os profissionais de venda da ABiSee, Inc.

Notas Importantes

- O Eye-Pal SOLO é programado para alto correção, e reiniciará por conta-própria caso necessário. Caso isto ocorra, espere um momento antes de utiliza-lo novamente.
- NÃO REMOVA o logo do ABiSee do centro do painel superior da base. Este logo permite que a câmera reconheça quando um documento seja colocando no dispositivo. Sem o logo, o dispositivo não funcionará corretamente.



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

Importador Exclusivo

Tecassistiva

Av. Dr. Altino Arantes, 345 - Vila Clementino
04042-032, São Paulo - SP
Brasil

Telefone/Fax: (11) 3266-4311

E-mail: teca@tecassistiva.com.br

www.tecassistiva.com.br

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 8:00 às 18:00 Horário de Brasília (BR)

Horário de Suporte Técnico: Segunda a Sexta, das 8:00 às 18:00 Horário de Brasília (BR)


FABRICANTE

AbiSee

20 Main St, Suite G2
Acton, MA 01720

Telefone: + 1-800-681-5909 ou +1-978-635-0202

www.abisee.com

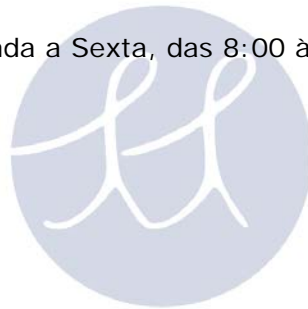

TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade