

Utilizando a Focus 14 ou  
40 Blue com o BrailleBack  
em seu dispositivo Android



**TECASSISTIVA**  
Tecnologia & Acessibilidade

**Freedom Scientific**

11800 31<sup>st</sup>Court North  
St. Petersburg, Florida 33716-1805  
USA

**Web site:** [www.FreedomScientific.com](http://www.FreedomScientific.com)

E POR:

**Tecassistiva**

Avenida Dr. Altino Arantes, 345  
Vila Clementino – São Paulo, SP  
BRASIL

**Telefone:** (11) 3266-4311

**Fax:** (11) 3171-2098

**Web site:** [www.tecassistiva.com.br](http://www.tecassistiva.com.br)

**E-mail:** [tecassistiva@tecassistiva.com.br](mailto:tecassistiva@tecassistiva.com.br)

O conteúdo deste documento poderá ser alterado sem qualquer aviso prévio. Nenhuma partedesta publicação pode ser reproduzida ou transmitida em qualquer formato ou qualquer meio eletrônico, ou mecânico, para qualquer propósito, sem permissão expressa escrita da Freedom Scientific e da Tecassistiva.

Copyright© 2012 Freedom Scientific. Todos os direitos reservados.

TECASSISTIVA  
Tecnologia & Acessibilidade

Usando a Focus 14 Blue ou 40 Blue com o BrailleBack em seu dispositivo Android.....	4
Comandos de navegação .....	4
Comandos Gerais.....	5
Importador Exclusivo .....	6



# TECASSISTIVA

## Tecnologia & Acessibilidade

# Usando a Focus 14 Blue ou 40 Blue com o BrailleBack em seu dispositivo Android.

## Pareando a Linha Braille Focus Blue

Nota: A Focus Blue é suportada pelo BrailleBack 0.93.0 ou superior.

Para estabelecer uma conexão entre a Focus Blue e seu dispositivo Android siga os seguintes passos:

1. Pressione o botão de energia da Focus Blue, localizado do lado esquerdo a mesma.
2. Em seu aparelho Android, vá para aplicativos, configurações e para Bluetooth e tenha certeza de o mesmo estar ligado.
3. Toque em buscar/procurar para encontrar os dispositivos próximos. Ao fim da busca um dispositivo de nome focus deverá aparecer na lista. Toque no mesmo para efetuar a conexão.
4. Uma vez que a conexão for efetuada lhe será solicitado um código de pareamento. Basta digitar o código "0000" e pressionar ok.

Nota: Uma vez executado o procedimento de pareamento bastará que você desbloqueie o seu dispositivo Android e pressione o botão de energia da Focus Blue "Caso a mesma esteja desligada" para que a conexão ocorra automaticamente. Não será preciso refazer nenhuma configuração.

## Comandos da Focus Blue para o BrailleBack

O trecho a seguir refere-se as teclas de digitação e navegação comuns da Focus Blue que normalmente seria utilizadas em um campo de edição mas que fora deles desempenham comandos de navegação.

### Comandos de navegação

Comandos para navegar pelos itens na tela.

Comando	Função
<b>Botão direito de painel</b>	Ir para a direita
<b>Botão esquerdo de Painel</b>	Ir para a esquerda
<b>Barra de lançamento direcional direita para baixo</b>	Ir para o próximo item
<b>Barra de lançamento direita para cima</b>	Ir para o item anterior
<b>Barra de lançamento esquerda para cima</b>	Navegar para a próxima linha
<b>Barra de lançamento esquerda para baixo</b>	Navegar para a linha anterior
<b>Botão de seleção direito</b>	Rolagem para a frente
<b>Botao de Seleção esquerdo</b>	Rolagem para trás

<b>Botões de rotação do cursor</b>	Ativam o item imediatamente presente a baixo do mesmo.
<b>Botões de rotação do cursor "Pressionar e segurar"</b>	Tocam e segura no item imediatamente a baixo do cursor

## Comandos Gerais

<b>Comando</b>	<b>Função</b>
<b>Pontos 1 e 2</b>	Ativam o botão voltar, se o mesmo estiver disponível
<b>Ponto 8</b>	Ativa a tecla ENTER
<b>Pontos 1 2 5</b>	Ativam o botão home
<b>Pontos 1 2 3 e 5</b>	Ativam o menu visão geral/aplicativos recentes
<b>Pontos 1, 3, 4 e 5</b>	Ativam a barra de notificações
<b>Pontos 1 2 e 3</b>	Ativam o menu de ajuda de teclado Braille



**TECASSISTIVA**  
Tecnologia & Acessibilidade

# Importador Exclusivo

---

**Tecassistiva**

Av. Dr. Altino Arantes, 345 - Vila Clementino  
São Paulo  
CEP: 04042-032, São Paulo - SP  
Brasil

**Telefone/Fax:** (11) 3266-4311

**Web site:** [www.tecassistiva.com.br](http://www.tecassistiva.com.br)


**E-mail:** [tecassistiva@tecassistiva.com.br](mailto:tecassistiva@tecassistiva.com.br)

**Horário de Atendimento:** Segunda a Sexta, das 8:30 às 17:30 Horário de Brasília (BR)

**Horário de Suporte Técnico:** Segunda a Sexta, das 8:30 às 17:30 Horário de Brasília (BR)

FABRICANTE**Freedom Scientific**

11800 31st Court North  
St. Petersburg, Florida 33716-1805  
USA

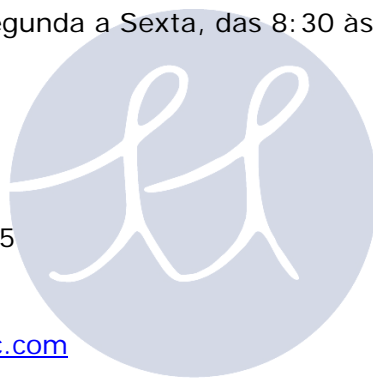

**Web site:** [www.FreedomScientific.com](http://www.FreedomScientific.com)

TECASSISTIVA  
Tecnologia & Acessibilidade