

Utilizando a Focus 14 e Focus 40 Blue com iOS

Guia de Combinação de Teclas



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

Freedom Scientific

11800 31stCourt North
St. Petersburg, Florida 33716-1805
USA

Web site: www.FreedomScientific.com

E POR:

Tecassistiva

Avenida Dr. Altino Arantes, 345
Vila Clementino – São Paulo, SP
BRASIL

Telefone: (11) 3266-4311

Fax: (11) 3171-2098

Web site: www.tecassistiva.com.br

E-mail: tecassistiva@tecassistiva.com.br

O conteúdo deste documento poderá ser alterado sem qualquer aviso prévio. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida em qualquer formato ou qualquer meio eletrônico, ou mecânico, para qualquer propósito, sem permissão expressa escrita da Freedom Scientific e da Tecassistiva.

Copyright© 2012 Freedom Scientific. Todos os direitos reservados.

TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

Índice

| | |
|---|---|
| Usando a Focus 14 Blue e Focus 40 Blue com iOS..... | 4 |
| Pareando a Linha Braille Focus | 4 |
| Comandos da Focus para o iOS | 4 |
| Comandos de Navegação | 4 |
| Comandos de Leitura | 5 |
| Comandos Gerais | 5 |
| Comandos específicos da Focus Blue para o iOS 5 | 6 |
| Comandos específicos da Focus Blue para o iOS 6 | 7 |
| Importador Exclusivo | |



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

Usando a Focus 14 Blue e Focus 40 Blue com iOS

Pareando a Linha Braille Focus

Para estabelecer uma conexão via Bluetooth entre a Focus e um dispositivo Apple iOS, tal como o iPhone, faça o seguinte:

1. Ligue a Focus.
2. No dispositivo iOS, abra Configurações, então vá até Geral, Bluetooth, e se certifique de que o Bluetooth esteja ligado. Se você estiver usando iOS 6, o Bluetooth está na tela Configurações principal.
3. Dê um toque duplo no botão Voltar para retornar a Geral, então vá até Acessibilidade e dê um toque duplo. Se você estiver usando iOS 6, dar um toque duplo no botão Voltar fará você voltar a Configurações. Você pode então dar um toque duplo em Geral e então
4. Acessibilidade.
5. Vá até VoiceOver e dê duplo toque para abrir as configurações do VoiceOver.
6. Vá até Braille e dê duplo toque para abrir as configurações Braille. O dispositivo iOS iniciará a busca por uma linha Braille.
7. Deslize até o item "Escolha Dispositivo Braille". Este item primeiro dirá "Pesquisando". O nome da Focus será mostrado aqui quando ele for encontrado.
8. Uma vez que a linha Braille for encontrada, dê toque duplo no nome para abrir a tela de pareamento. No dispositivo iOS, digite 0000 então, dê duplo toque no botão Feito, localizados no canto direito superior, para estabelecer a conexão.

Uma vez que a Focus tenha sido pareada, se você ligar a linha Braille antes de tirar o dispositivo iOS do standby, a linha Braille irá se conectar automaticamente. Lembre-se de travar o dispositivo antes de desligar a Focus para se certificar de que a detecção automática do Braille funcione corretamente da próxima vez que você desejar usar o Braille.

Comandos da Focus para o iOS

As seções seguintes listam os comandos iOS que podem ser executados a partir do teclado de estilo Perkins bem como outros controles nas linhas Braille Focus.

Comandos de Navegação

| Comando (+) espaço | Função |
|--------------------|----------------------------|
| PONTO 1 (+) espaço | Mover para o item anterior |
| PONTO 4 (+) espaço | Vai para o próximo item |

| | |
|--|---|
| PONTO 2(+) espaço | Deslocar o painel Braille para a esquerda |
| PONTO 5(+) espaço | Deslocar o painel Braille para a direita |
| PONTOS 1-2-3(+) espaço | Ir para o primeiro elemento |
| PONTOS 4-5-6 (+) espaço | Ir para o último elemento |
| PONTOS 1-3-4 EXTENDIDOS PONTOS 2-4-6 (+) espaço | Role uma página para a direita Role uma página para a esquerda |
| PONTOS 2-3-4 (+) espaço | Vai para a barra de status |
| PONTOS 2-3 (+) espaço | Selecione a configuração do rotor anterior |
| PONTOS 5-6 (+) espaço | Selecione a configuração do próximo rotor |
| PONTO 3 (+) espaço | Vá para o item anterior usando a configuração do rotor |
| PONTO 6(+) espaço | Vá para o próximo item usando a configuração do rotor |
| PONTOS 1-2-5 (+) espaço duas vezes | Inicia o Seleccionador de Tarefas rapidamente |

Comandos de Leitura

| Comando (+) espaço | Função |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| PONTOS 1-2-3-5 (+) espaço | Lê tudo começando no item selecionado |
| PONTOS 2-4-5-6 (+) espaço | Lê tudo, começando de cima |
| PONTOS 1-2-3-4 (+) espaço | Pausa ou continua a fala |

Comandos Gerais

| Função comando (+) espaço | Função |
|---|--|
| PONTOS 1-2 (+) espaço | Ativa o botão Voltar, se tiver |
| PONTOS 1-4-5 (+) espaço ou PONTO 7(+) espaço | Ativa a tecla Delete |
| PONTOS 1-5 EXTENDIDOS ou PONTO 8 | Ativa a tecla voltar |
| Pontos 1-2-4-5 (+) espaço | Alterna entre abreviado e Braille não abreviado |
| PONTOS 1-2-5 (+) espaço | Ativa o botão Home (duas vezes rapidamente para iniciar o seccionador de tarefa) |

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| PONTOS 1-3-4 (+) espaço | Ativa e desliga a fala |
| Pontos 2-3-4-5 (+) espaço | Ativa a tecla Tab |
| PONTOS 3-5-6 (+) espaço | Seleciona texto |
| PONTOS 2-3-6 (+) espaço | Desseleciona o texto |
| PONTOS 3-4-5 (+) espaço | Aumenta Volume |
| PONTOS 1-2-6 (+) espaço | Diminui Volume |

Comandos específicos da Focus Blue para o iOS 5

| Comando | Ação |
|---|---|
| Botão de Deslocamento de Painel para a Esquerda | Desloque o painel Braille para a esquerda |
| Barrade Deslocamento Esquerdapara Baixo | Vai para o próximo item, (determinado pela configuração do rotor) |
| Barra de Deslocamento Esquerda para Cima | Vá para o item anterior, (determinado pela configuração do rotor) |
| Botão de Seleção Esquerda | Ativa o item selecionado |
| Botão de Seleção Direita | Ativa o item selecionado |
| Barra de Deslocamento Direita para Baixo | Vai para o próximo item |
| Barra de Deslocamento Direita para Cima | Mover para o item anterior |
| Botão de Deslocamento de Painel para a Direita | Desloque o painel Braille para a direita |
| Botão de Deslocamento Direita para Baixo | Deslocar o painel Braille para a direita |
| Botão de Deslocamento Esquerdo para Cima | Desloca o painel Braille para a esquerda |
| Botão de Modo de Navegação para Esquerda | Ativa o item selecionado |
| Botão de Deslocamento para Direita para Baixo | Desloca o painel Braille para a direita |
| Botão de Deslocamento para Direita para Cima | Desloca o painel Braille para a esquerda |
| Botão de Modo de Navegação para Direita | Ativa o item selecionado |

Comandos específicos da Focus Blue para o iOS 6

| Controle | Ações |
|---|---|
| Linha de Posicionamento | Duplo toque no item selecionado |
| Linha de Posicionamento de Status | Altera o status expandido |
| Botão de Movimentação Esquerdo para Cima | Vai para o item anterior usando a configuração do rotor. |
| Botão de Movimentação Esquerdo para Baixo | Vá para o próximo item usando a configuração do rotor |
| Botão Modo Esquerdo | Selecione o item abaixo dos seus dedos |
| Botão de Movimentação para Direita para Cima | Vai para o item anterior |
| Botão de Movimentação para Direita para Baixo | Vai para o próximo item |
| Botão de Modo Direito | Selecione o item abaixo dos seus dedos |
| Botão de Deslocamento de Painel para Esquerda | Desloca o painel Braille para a esquerda |
| Botão de Deslocamento de Painel para Direita | Desloca o painel Braille para a direita |
| Botão Seletor Esquerdo | Ativa o botão Voltar, setiver |
| Botão Seletor Direito | *Comando de Evento Múltiplo (Alterna entre Iniciar/Parar) |
| Barra de Deslocamento Esquerdo para Cima | Rola uma página para cima |
| Barra de Deslocamento Esquerdo para Baixo | Rola uma página para baixo |
| Barra de Deslocamento Direita para Baixo | Role uma página para a esquerda |
| Barra de Deslocamento Direita para Cima | Role uma página para a direita |

*Comando de Evento Múltiplo

Inicia e termina a ação atual. Por exemplo: Atende e desliga uma ligação telefônica; Inicia e para o playback de música e vídeo; Inicia e para o cronômetro; Inicia e para a gravação de vídeo; Tira uma foto na Câmera; Inicia e para a gravação de Memorando de Voz; Pausa e reinicia o playback de mensagem Voicemail; Para a gravação de saudação personalizada do Voicemail.

Importador Exclusivo

Tecassistiva

Av. Dr. Altino Arantes, 345 - Vila Clementino
São Paulo
CEP: 04042-032, São Paulo - SP
Brasil

Telefone/Fax: (11) 3266-4311

Web site: www.tecassistiva.com.br

E-mail: tecassistiva@tecassistiva.com.br


Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 8:30 às 17:30 Horário de Brasília (BR)

Horário de Suporte Técnico: Segunda a Sexta, das 8:30 às 17:30 Horário de Brasília (BR)

FABRICANTE

Freedom Scientific

11800 31st Court North
St. Petersburg, Florida 33716-1805
USA

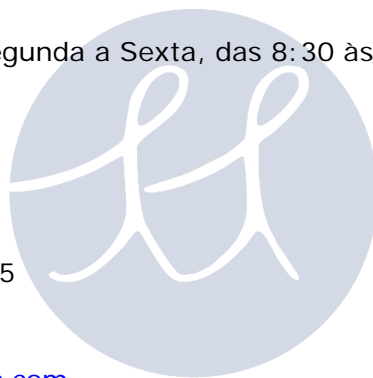

Web site: www.FreedomScientific.com

TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade