

Readable 3

Guia do Usuário



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

PUBLICADO POR

ATE

Haspelstraat 27
9000 Gent
Bélgica

Telefone: +32-9-236 39 45

Fax: +32-9-228 54 41

Email: ate@skilate.com

www.skilate.com

E POR

Tecassistiva

Av. Dr. Altino Arantes, 345 - Vila Clementino
CEP: 04042-032, São Paulo- SP
Brasil

Telefone/Fax: (11) 3266-4311

E-mail: teca@tecassistiva.com.br

www.tecassistiva.com.br

O conteúdo deste documento pode ser alterado sem qualquer aviso prévio. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida de nenhuma forma ou por nenhum meio eletrônico ou mecânico, por nenhum motivo, sem expressa permissão escrita da ATE e da Tecassistiva.

TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade


Índice


Componentes do Readable.....	4
Como Inserir um Livro	7
Trabalhando com o Readable	13
Controle Manual pelo Controle Remoto Infra-Vermelho	13
Digitalizar.....	16
Dicas	18
Importador Exclusivo	21



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

Componentes do Readable

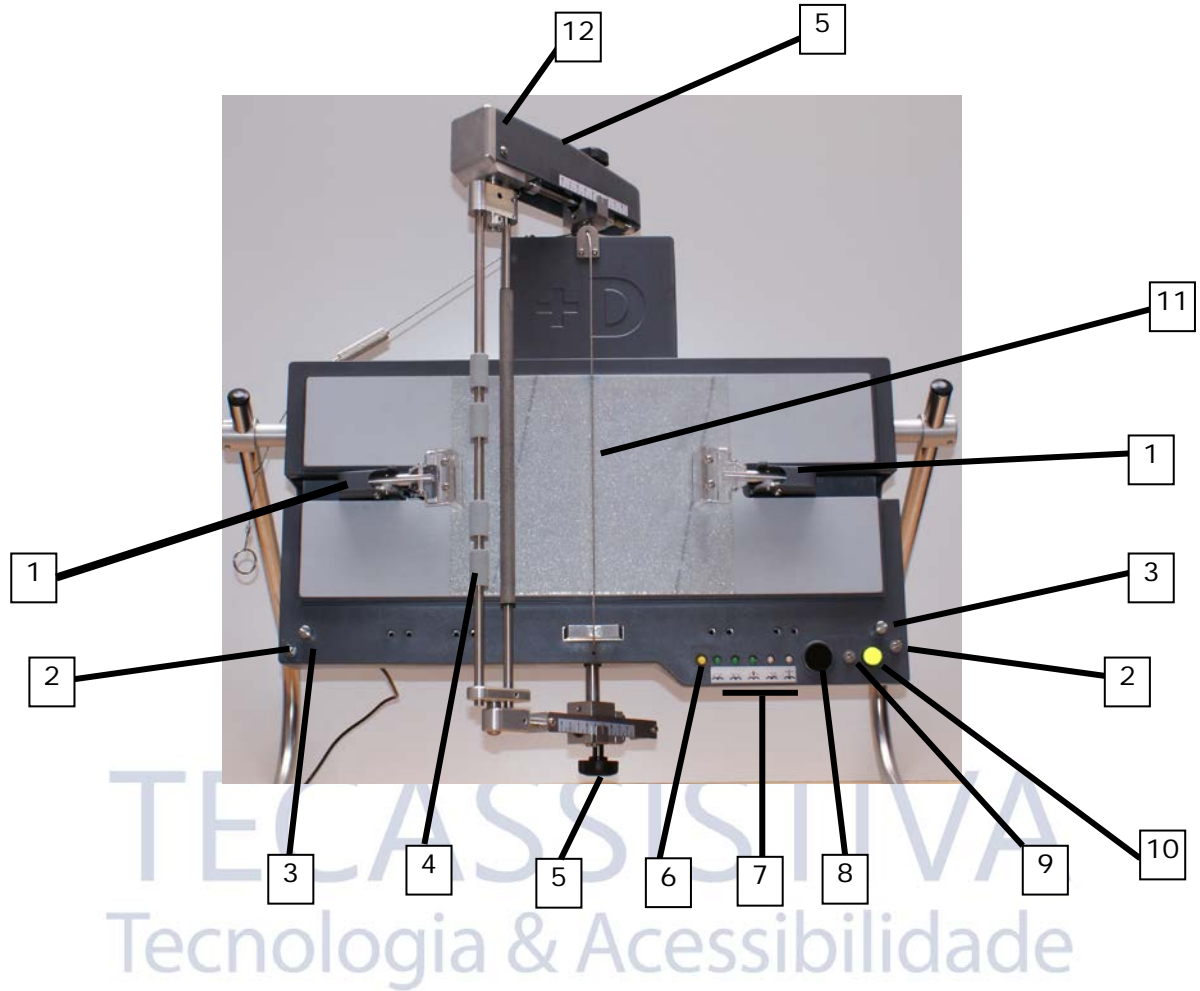

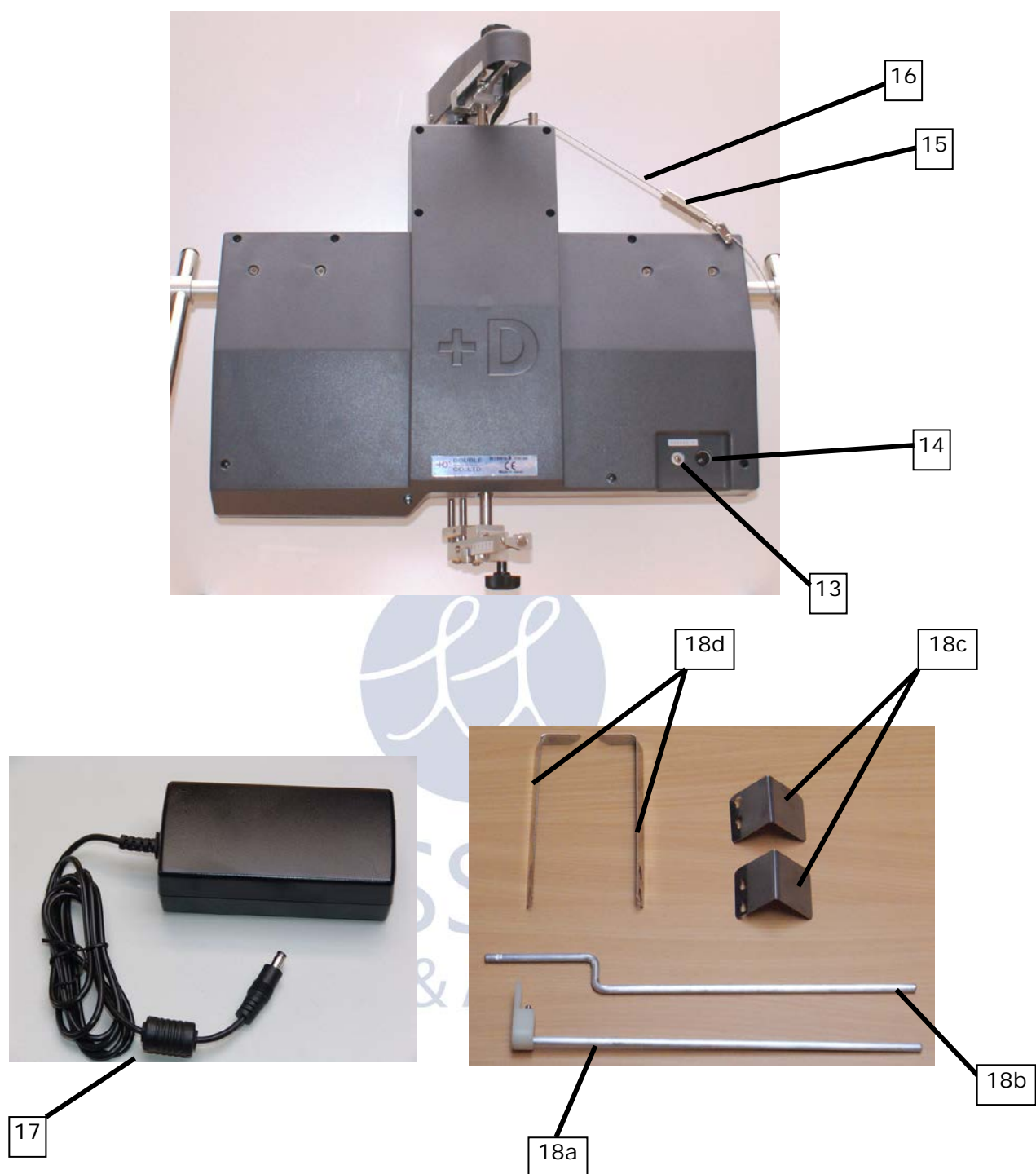

1. Unidade de apoio
2. Alternar entre aberto / fechado a unidade de apoio
3. Suporte para livro
4. Rolo Duplo
5. Maçaneta para apertar / soltar a unidade de virar
6. Maçaneta amarela para ajustar a velocidade de varredura
7. LEDs do módulo de varredura
8. Receptor infra-vermelho
9. Interruptor alternador para escolher o modo (Direto ou varredura)

10. Botão Liga/Desliga
11. Cabo
12. Unidade de virada
13. Conector para interruptor de uma função
14. Conector para adaptador
15. Fixador Cabo
16. Botão empurrar para afrouxar o cabo
17. Adaptador
18. Acessórios para livros maiores



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

Como Inserir um Livro

Esta é a parte mais importante de utilizar o Readable. Caso o livro for inserido corretamente, então o usuário pode controlar o Readable sem nenhum problema. Entretanto, nós avisamos a você tomar um pouco de tempo e ler estas instruções com cuidado.

1. Coloque o Readable em uma posição vertical (isto faz o ajuste mais fácil)



2. Conecte o adaptador e ligue o Readable pressionando o botão Liga/Desliga (10).



Este botão acenderá uma luz verde caso a voltagem certa estiver disponível.

3. Abra os dois "Unidade de apoio (1)" pressionando seus correspondentes "Alternar entre aberto / fechado a unidade de apoio (2)" na parte de fora do Readable por alguns segundos.




Alternar entre aberto / fechado a unidade de apoio (2)

4. Pressione as unidades de gentilmente o máximo possível nas laterais do Readable (para que você tenha mais espaço inserindo o livro).




5. Frouxo "Maçaneta para apertar / soltar a unidade de virar (5)" (no topo e na extremidade) um pouco e deslize as barras o mais longe o possível do Readavle.

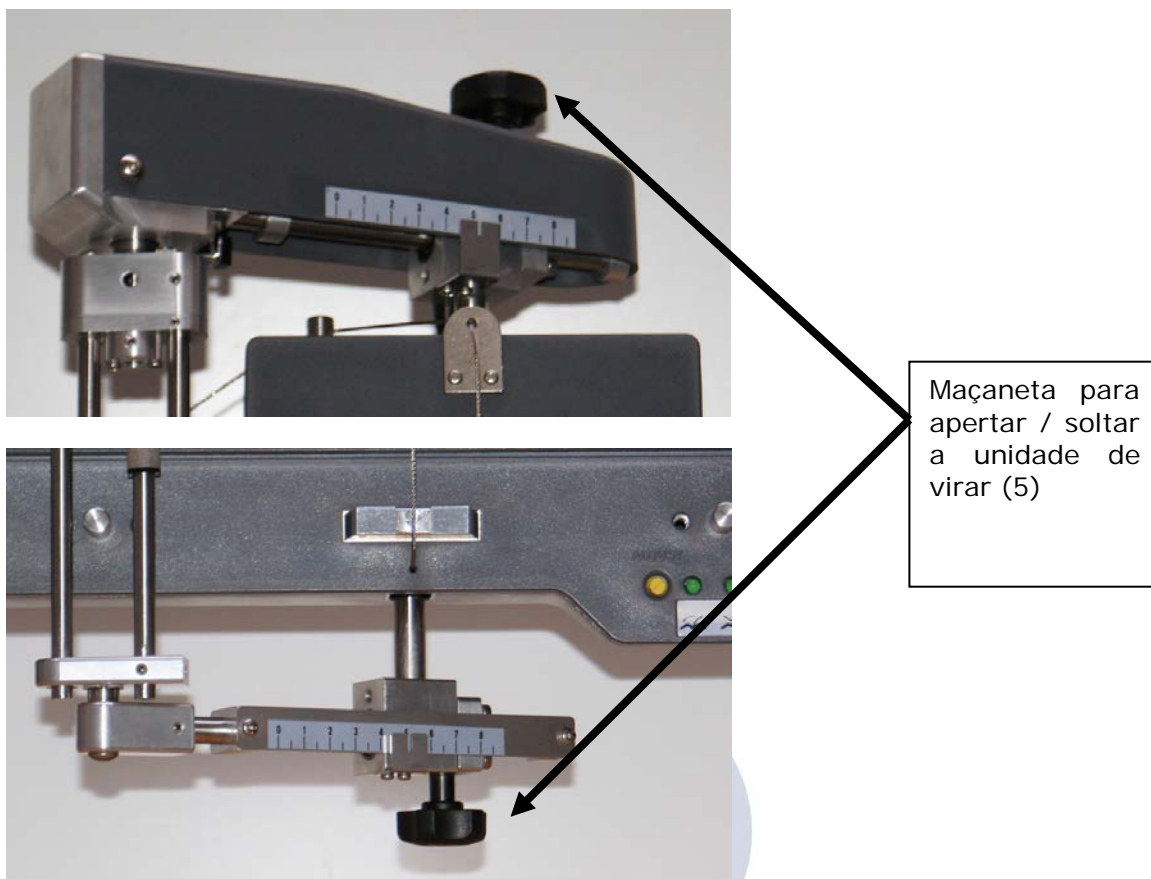

Maçaneta para apertar / soltar a unidade de virar (5)


6. Afrouxe o “Fixador Cabo (15)” e libere o cabo pressionando o “Botão empurrar para afrouxar o cabo (16)”. Aperte o parafuso para afrouxar o cabo.

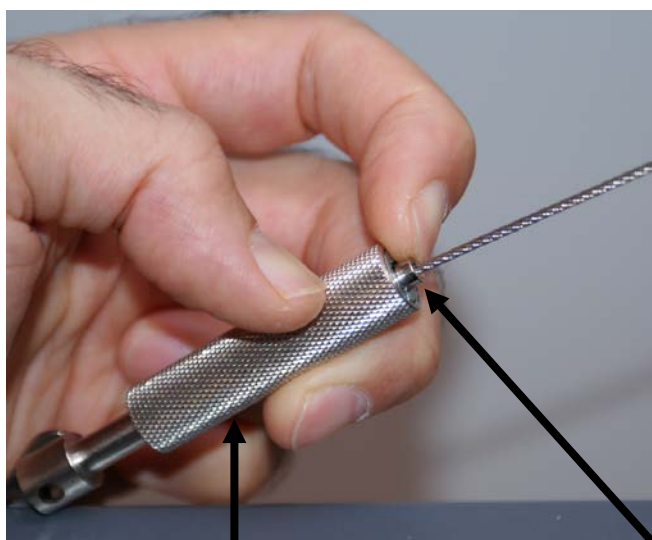

Fixador Cabo (15)

Botão empurrar para afrouxar o cabo (16)

7. Segure o livro em sua mão como é mostrado na figura e insira o no Readable. O “Cabo (11)” pode estar em algum lugar no meio do livro.

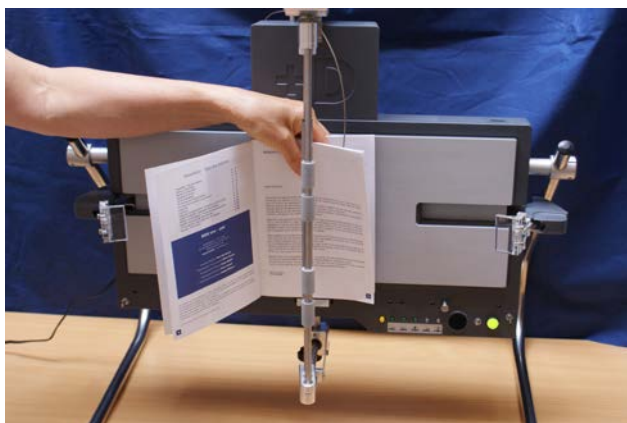

O livro deve permanecer no pequeno suporte de metal.




8. Puxe o “Cabo (11)” para manter o livro no lugar. Ativando o “Fixador Cabo (15)” você pode apertar o cabo e ter certeza de que o livro continua na posição.
9. Mover para “Unidade de apoio (1)” de volta para o meio do Readable em ambos os lados. Feche estas unidade pressionando “Alternar entre aberto / fechado a unidade de apoio (2)” no meio do Readable. Mantenha o interruptor nesta posição até que o sustentador de unidades esteja fechado completamente e pare de mover. Tenha certeza de que o acrílico está na margem em branco do livro e não no texto. Primeiro tom de posição do acrílico deslizando toda a unidade com cuidado para direita ou esquerda.




10. Deslize o “Unidade de virada (12)” de volta para o Readable até que você tenha o espaço de $\pm 1.5\text{cm}$ entre o rolo e o livro. Prenda o “Maçaneta para apertar / soltar a unidade de virar (5)” no topo e na extremidade



11. Caso for necessário, parafuse o "Suporte para livro (3)" nos lados direito e esquerdo em outro burado para que eles sustentem o livro.

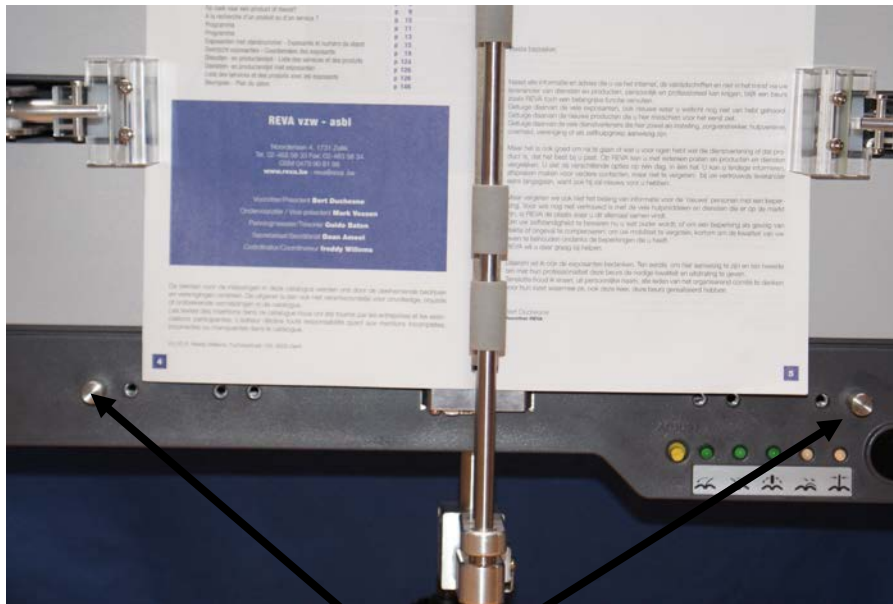

Suporte para o livro 3

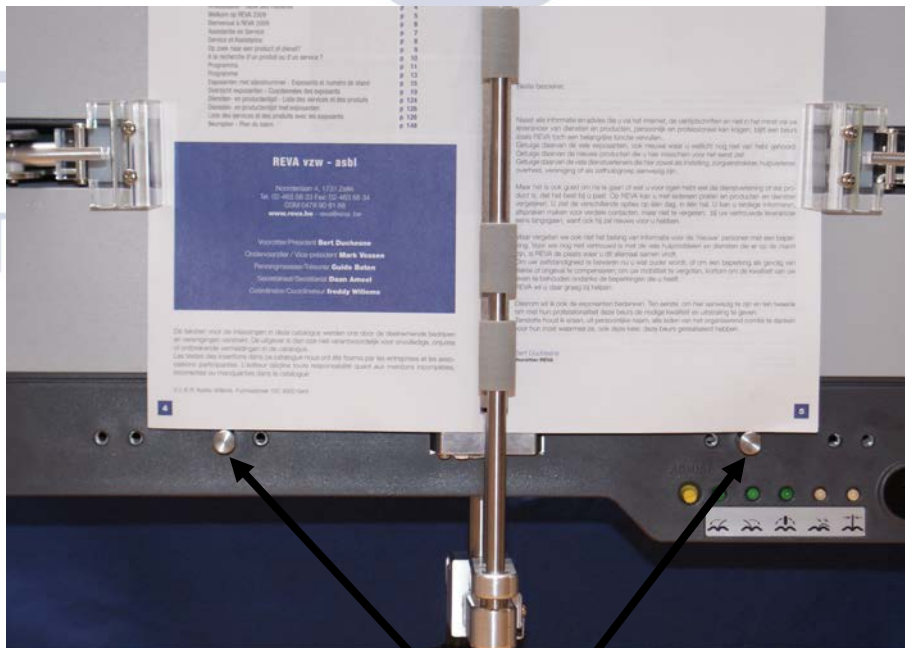

Suporte para livro 3

Trabalhando com o Readable

Controle Manual pelo Controle Remoto Infra-Vermelho

Tenha certeza de que o Interruptor alternador para escolher o modo (Direto ou varredura) (9) está na posição "Direto".






Interruptor alternador para escolher o modo (Direto ou varredura) (9)

Caso não esteja, desligue o dispositivo, pressionando o botão Liga/Desliga(10). Coloque o interruptor no modo "Direto" e ligue o dispositivo

Ligando o controle remoto no Readable você encontrará os seguintes botões:



1.  : Com este botão você coloca o dispositivo na posição Stand-by. Com este botão o Readable **NÃO** está desligado completamente. Isto é possível somente manualmente pressionando o botão Liga/Desliga
2.  : Este é utilizado virando a página do lado direito para o esquerdo.
3.  : Este é utilizado virando a página do lado esquerdo para o direito.



4. : Para mover o "Unidade de virada (12)" da esquerda para a direita e vice versa sem virar a página. Após virar a página, dependendo em qual direção a página foi virada, o "Unidade de Virada" continuará sobre a página esquerda ou direita. Você pode utilizar esta função para mover a "Unidade de virada" para outro lado e ler página que está abaixo desta unidade de virada.



5. : Caso você estiver lendo um livro bem escorregadio (brilhante) ou um papel fino é possível que os rolos da "unidade de virada" deslizem e não conseguem virar a página. Ativando esta função da "unidade de virada" empurre com mais força a página enquanto estiver enrolando-a. Neste caminho o Readable pode, na maioria dos casos, virar uma página.
Quando esta função é ativada, o LED vermelho acima do mesmo símbolo no Readable acenderá (no botão do canto direito do Readable). Empurre novamente neste botão para desativar esta função.



6. : Esta função é geralmente necessitada quando você lê um livro pequeno mas espesso. Devido esta combinação é possível que as páginas não são aplainadas uma vez que são viradas (veja a figura abaixo).



IVA
abilidade


Ativando esta função o Readable aplaina as páginas de saliência. Quando esta função é ativada, o LED vermelho acima do mesmo símbolo no Readable acenderá (no canto direito do Readable). Empurre novamente neste botão para desativar esta função.



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

Digitalizar

Caso você possui problemas ao apertar os botões do controle remoto do Readable, você pode utilizar a varredura embutida do dispositivo. Conecte no interruptor de uma função para o lado esquerdo do controle remoto do Readable (existe uma variedade ampla de um interruptor de uma função disponível. Para maiores informações sobre estes interruptores por favor contate seu fornecedor local). A novidade no Readable 3 é que você pode também conectar este interruptor diretamente ao Readable. A conexão é na traseira próximo do conector da fonte de energia.

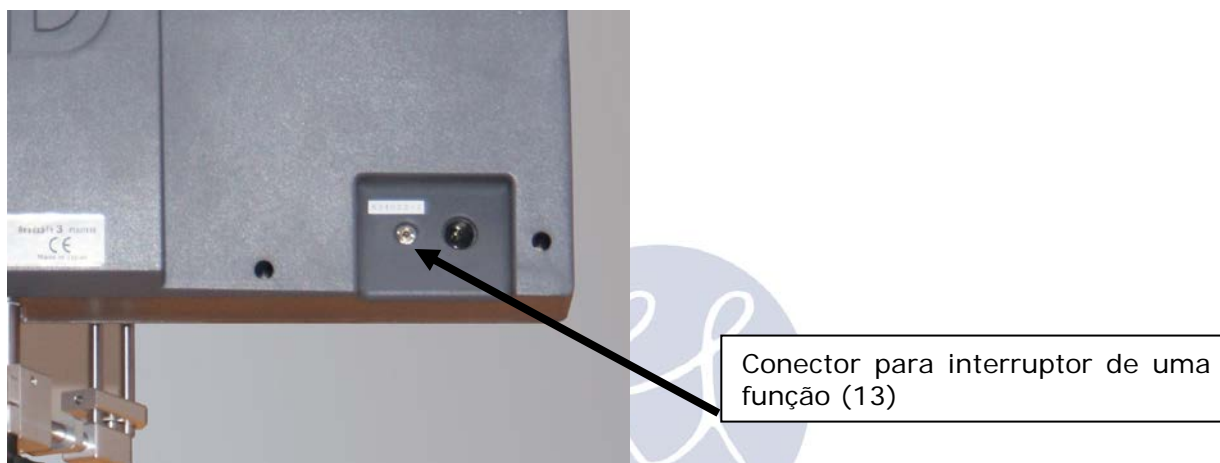

No canto direito inferior do Readable você verá o 5 "LEDs do módulo de varredura (7)". Cada LED corresponde ao símbolo acima. Para explicação detalhada sobre estas funções veja a seção "Controle Manual pelo Controle Remoto Infra-Vermelho 0)".





1. Tenha certeza de que o Interruptor alternador para escolher o modo (Direto ou varredura) (9) está na posição "Scan"(varredura). Caso não, desligue o dispositivo, pressionando o botão Liga/Desliga (10). Coloque os Interruptores Seletores na posição "Scan"(varredura) e ligue o dispositivo novamente.
2. Você pode ajustar a velocidade da varredura ativando o "Maçaneta amarela para ajustar a velocidade de varredura (6)".
3. Você ativou uma função pressionando seu interruptor de uma função enquanto o LED correspondente acenderá.



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

1. **NÃO** utilize funções  ou  a não ser que você precise.

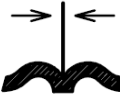Caso você utilize a função  para um livro com papel "normal", então é possível que o Readable vire duas páginas de uma vez.

Caso você utilize o  quando não necessitado, então é possível que seu livro por completo é movido para a direita ou esquerda e assim uma unidade perde sua tração no livro.

2. No modo Varredura você pode bloquear as funções  e . Mantenha o interruptor uma função pressionada por aproximadamente 3 segundos enquanto o



LED acende. Solte o interruptor uma função e você perceberá que a varredura não trabalha nestas funções. Para fazer com que as funções funcionem novamente, mantenha o interruptor uma função pressionado novamente por 3 segundos enquanto o



LED  é aceso. Caso **NÃO** seja possível bloquear estas funções no modo "Direct" (direto).

3. Utilize o "Acessórios para livros maiores (18a,b,c e d)" enquanto estiver lendo livros maiores (maiores que A5). Enquanto estiver lendo livros menores você precisará remover estes acessórios.



18d

18a

18d

Caso você tentar virar páginas maiores sem acessório **18a**, então é possível que a página fique atolada entre os rolos da "unidade de virada".



Figura detalhada: 18a

Neste caso a "unidade de virada" continua virando por aproximadamente 15 segundos. Caso a página continua atolada entre os rolos, então o Readable entra no modo Alarme. O Readable para de funcionar e então os 5 LEDs de varredura piscarão. Para resetar o Readable você precisará desligar e ligar utilizando o botão Liga/Desliga (10). Caso **NÃO** seja possível reiniciar o Readable utilizando o botão Liga/Desliga no controle remoto.

Caso você estiver lendo uma revista ampla com poucas páginas, então você precisa recolocar o bastão com o bastão em formato de S **18b**.

Utilize o acessório 18 c quando você deseja ler um livro pequeno mas espesso. Por meio destas placas você faz com que os braços segurem as unidades por mais tempo.



Figura detalhada: 18c

Quando você lê um livro em formato A4 ou maior, é possível que os cantos das páginas dobrem para baixo, especialmente se você inclina a Readable através do livro na cama. Utilize o acessório **18d** para manter os cantos em sua posição. Apenas deslize eles sobre o "Unidade de apoio1)".



Figura detalhada: 18d

- O giro da "unidade de virada" não é potente. Isto é uma medida de segurança para evitar que a página rasgue em caso de uma entalar na unidade de virada.

Importador Exclusivo

Tecassistiva

Av. Dr. Altino Arantes, 345 - Vila Clementino
04042-032, São Paulo - SP
Brasil

Telefone/Fax: (11) 3266-4311

E-mail: teca@tecassistiva.com.br

www.tecassistiva.com.br

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 8:00 às 18:00 Horário de Brasília (BR)

Horário de Suporte Técnico: Segunda a Sexta, das 8:00 às 18:00 Horário de Brasília (BR)

FABRICANTE

ATE

Haspelstraat 27
9000 Gent
Bélgica

Telefone: +32-9-236 39 45

Fax: +32-9-228 54 41

Email: ate@skilate.com

www.skilate.com



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade