

# Victor Reader Stream 3

Guia de Combinação de Teclas



**TECASSISTIVA**  
Tecnologia & Acessibilidade

PUBLICADO POR

**HumanWare**

1800, Michaud street  
Drummondville, (Quebec)  
Canadá J2C 7G7

**Número gratuito:** 1 888 723-7273 (Canadá e E.U.A.)

**Fone:** +1 819 471 4818

**Fax:** +1 819 471 4828

**E-mail:** ca.info@humanware.com

[www.humanware.com](http://www.humanware.com)

E POR

**Tecassistiva**

Av. Dr. Altino Arantes, 345 - Vila Clementino  
CEP: 04042-032, São Paulo- SP  
Brasil

**Telefone/Fax:** (11) 3266-4311

**E-mail:** teca@tecassistiva.com.br

[www.tecassistiva.com.br](http://www.tecassistiva.com.br)



O conteúdo deste documento pode ser alterado sem qualquer aviso prévio. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida de nenhuma forma ou por nenhum meio eletrônico ou mecânico, por nenhum motivo, sem expressa permissão escrita da HumanWare e Tecassistiva.

Tecassistiva  
Tecnologia & Acessibilidade



## Funções do Teclado Numérico

Biblioteca, se pressionada uma vez (pressionar várias vezes para acessar todas as pastas arquivadas)

1. Manual do Usuário, se pressionada continuamente
2. Navegação por elemento
  - Deslocar para cima
3. Apagar
4. Mover para trás
- 5- Onde Estou?
6. Mover para a frente
7. Menu, se pressionada uma vez (pressionar várias vezes para ir a todas as opções de menu)
  - Altera voz de áudio, se pressionada continuamente
8. Navegação por elemento
9. Na pasta música altera entre modos de gravação áudio e modo de reprodução aleatório
  - \* - Cancelar, se pressionada uma vez;
- Bloqueio de teclado, se pressionada continuamente (para desbloquear carregar em sequência 1,2,3)
0. Informação, se pressionada uma vez
  - Modo de Descrição de Teclas, se pressionada continuamente
- #-Confirmar

**Tecla Ir Para:** Escolhe o modo de avanço (nota, tempo, porcentagem)

**Tecla Marcador:** Permite executar todas as funções de marcador ( Ir para, inserir, iniciar seleção, lista de marcadores, apagar)